





Après avoir effectué **une désinfection en 4 temps**, retirer la protection de l'aiguille



Faire un plis cutané et piquer à 45° en tenant les ailettes

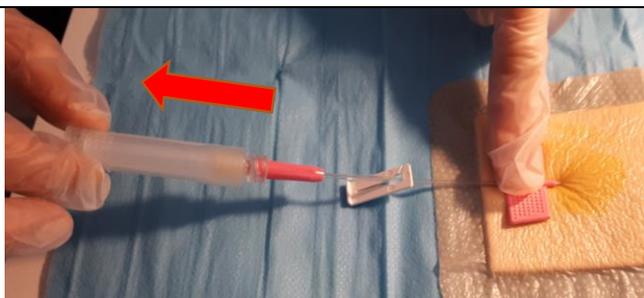


Tenir les ailettes et tirer sur la bague blanche

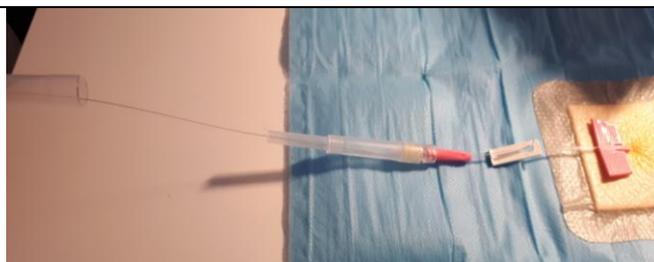


Remonter le mandrin jusqu'au bout du système sécurisé




Retirer l'embout du dispositif sécurisé et le jeter dans la boîte pour objets piquants coupants tranchants

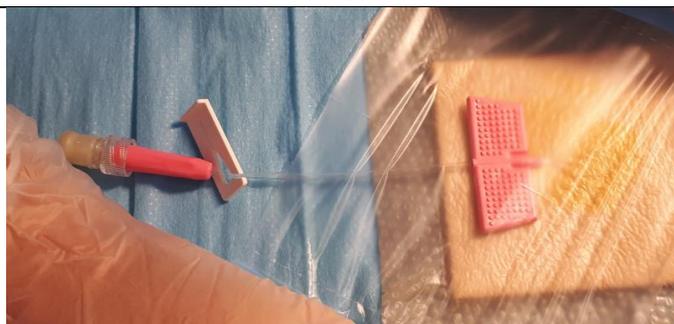

Fixer les ailettes à la peau avec un film transparent

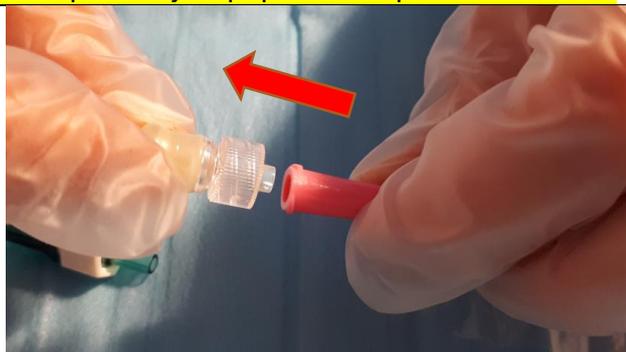

Dévisser le bouchon obturateur

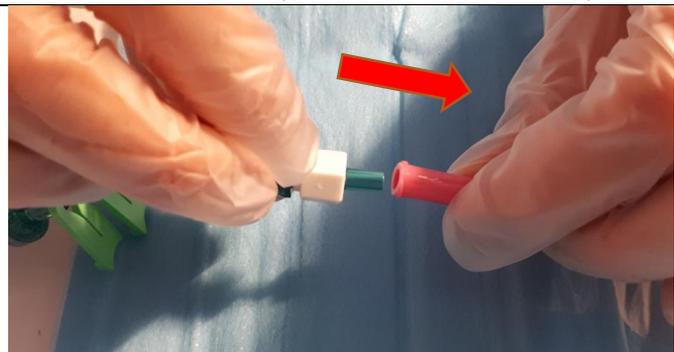

Visser une valve bidirectionnelle ou un prolongateur multivoies



Le dispositif peut rester **4 à 7 jours** en place et doit être contrôlé tous les jours