


Matériel nécessaire

- 1 set double poches 4X2L
- 1 Kit Rocket® ligne de drainage
- 1 set à pansement
- 1 set avec champ stérile et 5 compresses
- 1 mousse pré-fendue type Métalline®
- 1 pansement transparent adhésif 15X20
- 1 paire de gants non stériles
- 1 détergent (type chlorhexidine scrub 4%)
- 1 unidose de NaCl 0.9% 5ml
- 1 antiseptique type chlorhexidine alcoolique 2%
- 1 blouse
- 1 flacon de soluté hydroalcoolique
- 1 sac poubelle et fût étanche DASRI
- 1 sac poubelle d'ordures ménagères (patient)
- 1 sac pour emballages (patient)
- Lingettes désinfectantes

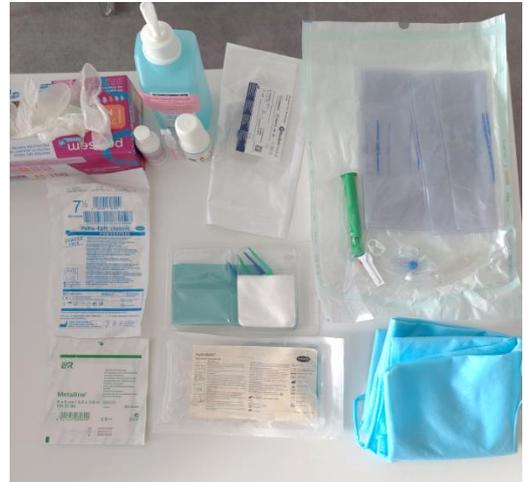

Installer le matériel de drainage sur l'adaptable préalablement désinfecté. Installer le patient allongé, en hauteur. 1



Enfiler une blouse, des gants non stériles, imprégner 2 compresses de chlorhexidine alcoolique 2%, et retirer le pansement du patient. 2



Installer un champ stérile sous le drain du patient, dévisser le bouchon et désinfecter la valve du drain pleurX. 3



Jeter les gants non stériles, se désinfecter les mains au SHA, enfiler les gants stériles.
Connecter l'adaptateur à la ligne de drainage Rocket®
Clamper la ligne et la molette des poches de recueil. 4



Visser la ligne de drainage à la tubulure des poches (côté embout vert). 5



Visser la ligne de drainage au drain pleurX (dans le sens des aiguilles d'une montre).

6




Déclamper la ligne et fixer, si besoin, la tubulure avec du sparadrap le temps du drainage. Lever le lit du patient le plus haut possible et mettre les poches au plus bas.

7



Clamper la ligne de drainage, la dévisser du drain (sens inverse des aiguilles d'une montre).
Désinfecter la valve avec de la chlorhexidine alcoolique.
Visser le bouchon stérile au drain.

8

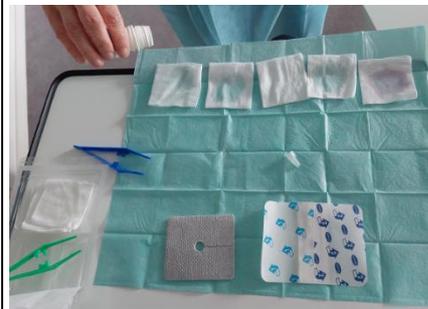

Retirer les gants stériles, se désinfecter les mains et préparer les compresses du set à pansement pour la désinfection cutanée en 5 temps.
Effectuer la désinfection : savonnage, rinçage, séchage et double désinfection du point d'insertion du drain.

9



Positionner la mousse pré-fendue autour du drain.
Enrouler le drain sur la mousse.
Appliquer des compresses sur le drain.
Coller le film adhésif transparent.

10

Formulaire
FICHE DE SUIVI PONCTION ASCITE

pn: kgs
pinal à l'admission: cm
du périmètre abdominal de cm
ids de kgs
sdominales
ent

Page n° : ETIQ

* → Contacter l'HAD

D'EVALUATION	Date: ... / ... / 20...			
	IDEL:	IDEL:	IDEL:	IDEL:
	Oui/Non/Valeur	Oui/Non/Valeur	Oui/Non/Valeur	Oui/Non/Va
x/sem <input type="checkbox"/> ... x/mois				
iminal				
sem <input type="checkbox"/> ... x/mois				
inale → quotidien				
ue de 1 à 10				
dyspnée → quotidien				
ue de 1 à 10				
ponctionné				
mpide				
mémorragique				



Eliminer les poches dans un sac puis fût DASRI.
Tracer le soin sur la fiche de suivi.

11