

<p>Rédaction L. LE MAUGUEN, IDEC Hygiéniste, 18/06/2025 M. LE ROUX, IDEC, membre EOH, 18/06/2025</p> <p><b>ORIGINAL SIGNÉ</b></p>	<p>Vérification K. ALAIN, Cadre de Santé, membre EOH, 18/06/2025</p> <p><b>ORIGINAL SIGNÉ</b></p>	<p>Approbation C. CHARBONNIER, Médecin, membre EOH, 18/06/2025</p> <p><b>ORIGINAL SIGNÉ</b></p>
---	---	---

Évolution			
N° version	Date d'application	Nombre de pages	Observation(s)
1	18/06/2025	1	Création

## PRESENTATION

Le dispositif SécurAcath® est utilisé par le GHBS pour les cathéters de type MIDLINE/PICCLINE. Il s'agit d'un système de fixation qui maintient le cathéter à l'aide d'un dispositif d'ancrage sous-cutané.

Lien de présentation : [https://www.youtube.com/watch?v=7DyF\\_rGEmks](https://www.youtube.com/watch?v=7DyF_rGEmks)

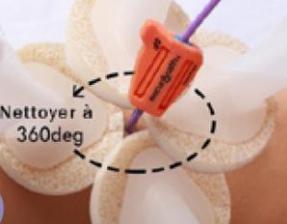
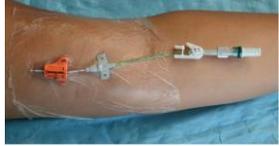
## RECOMMANDATION D'UTILISATION

Ce dispositif remplace les fixations adhésives de type : Griplock® ou Statlock® et reste en place sur le cathéter durant toute la durée du maintien de celui-ci. Le système d'ancrage permet de soulever le cathéter sans risquer son retrait pour la désinfection du point d'insertion.

Sa pose se fait au GHBS par un IADE ou un radiologue.

La réfection du pansement est hebdomadaire selon les protocoles de désinfection habituels de l'HAD.

**Nous pouvons vous accompagner pour la réfection du premier pansement des patients qui en bénéficient.**

	 <p><b>1</b></p> <p>Le SécurAcath® doit être soulevé à 90° (sans mouvements latéraux) à chaque changement de pansement. Laissez SécurAcath® dans sa position d'origine. Attention à ne pas tordre ni faire pivoter le SécurAcath lorsque vous soulevez le cathéter.</p>
 <p><b>2</b></p> <p>Nettoyez à 360deg</p>	 <p><b>3</b></p> <p>Nettoyez le boîtier du SécurAcath® (Savon, rinçage, séchage) dessus et dessous</p>
 <p><b>4</b></p> <p>Désinfectez le site d'insertion en 2 temps (temps de contact 30 secondes)</p>	 <p><b>5</b></p> <p>Collez un film transparent adhésif directement sur le système. Le pansement doit être occlusif. Il est possible de positionner une compresse pliée en 2 sous le SécurAcath® pour le confort du patient (ne jamais cacher le point d'insertion)</p>